




## Gebrauchsanweisung für InstantVap 18V Kabelloser Oxalsäure Verdampfer

### **Tragen Sie immer die richtige Sicherheitsausrüstung:**

- Säurefeste Handschuhe
- Atemschutzmaske FFP3
- Schutzbrille für die Augen
- Langärmlige Kleidung
- Nur für den Gebrauch im Freien!

**Achtung das Gerät ist nach der Behandlung noch eine Zeit lang heiß. Legen Sie das Gerät nicht ins Gras oder auf brennbare Oberflächen. Erst nach dem Erkalten transportieren.**

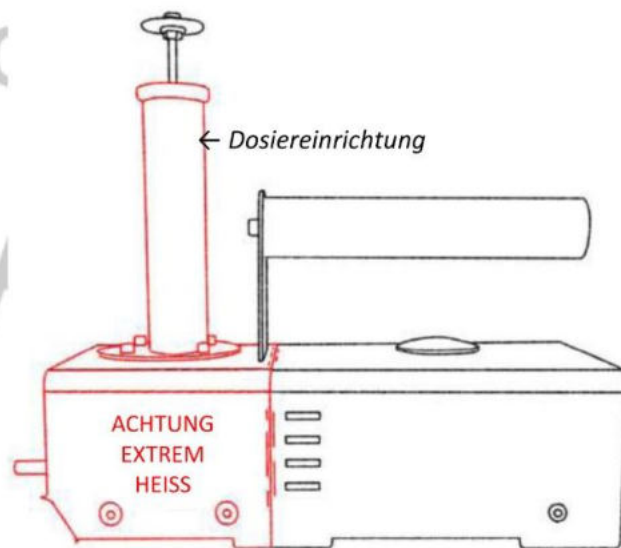

### **Gebrauchsanweisung InstantVap 18V**

#### **1. Schließen Sie Ihre Batterie an.**

- Gehen Sie sicher, dass der Einschaltknopf auf OFF ist.
- Das Gerät soll die aktuelle Temperatur anzeigen, aber nicht aufheizen.

Aktuelle Temp. →

Temperatur einstellen

#### **2. Schalten Sie das Gerät ein.**

#### **3. Überprüfen Sie vor der Behandlung Ihre Spannung**

Die Überwachung der Batteriespannung ist wichtig, um die Lebensdauer Ihrer Batterie zu verlängern. Betreiben Sie eine Batterie niemals unter 15 V. Aufgrund einer eingebauten Tiefentladeschutzschaltung schaltet das Gerät bei ca. 15,4 V ab und startet erst, wenn ein geladener Akku angeschlossen ist. Damit das Gerät startet muss die Batteriespannung über 17,2 V liegen.

#### **4. Behandlung**

- **Warten Sie 1-2 Minuten bis die voreingestellte Temperatur von 230 Grad erreicht ist.**
- Drücken Sie den Oxalsäurespender in das vorbereitete Oxalsäurepulver.
- Setzen Sie den Oxalsäurespender am InstantVap18V Oxalsäureverdampfer an und betätigen die Spenderfunktion sodass das Oxalsäurepulver in die Verdampfungskammer fällt.
- Die Temperatur sinkt um ca. 10-15 Grad während der Verdampfung.
- Wenn die Temperatur zu steigen beginnt ist die Oxalsäure sublimiert und die Verdampfung ist abgeschlossen.

Einschalten on/off



Solltemperatur ändern.

#### 4. Abschluss der Behandlung

- Schalten Sie das Gerät ab und entfernen Sie den Akku vom Gerät wenn Sie die Behandlung abgeschlossen haben. Laden Sie die Batterie am selben Tag auf. Reinigen Sie den Verdampfer.


*So stellen Sie die Dosiereinrichtung ein:*

**1. Entfernen Sie die Dosiereinrichtung vom Verdampfer.**

**ACHTUNG Heiss!**

**2. Passen Sie die Dosierung durch Drehen des Griffs an.**

- Nicht über die Anzeige hinaus drehen. Einstellbar von 1-4g.
- 1 ist 1Gram Oxalsäurepulver.

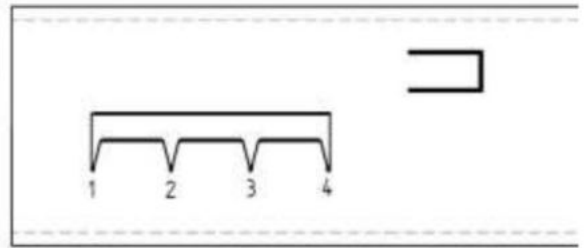

**Für die Verdampfung von Api Bioxal ist der InstantVap 18V nicht oder nur bedingt geeignet. Es müsste hierbei nach jeder einzelnen Verdampfung die Brennkammer gereinigt werden da das Api Bioxal einen Zusatzstoff enthält welcher beim Verdampfen Rückstände in der Verdampfungskammer hinterlässt. Mit herkömmlichen Oxalsäurepulver funktioniert dies einwandfrei.**

---

## Wartung

*Reinigen Sie das Gerät nach den Behandlungen.*

- 1. Lassen Sie das Gerät auf ca. 80 Grad abkühlen. Bei angeschlossener Batterie und ausgeschaltetem Gerät können Sie die aktuelle Temperatur des Geräts überwachen. Ein heißes Gerät kann Dampf erzeugen, der zu Verbrennungen führen kann. Falls Sie zur Reinigung die spezielle Silikonkappe verwenden, beachten Sie bitte die mitgelieferte Anleitung.**
- 2. Nach Abschluss der Arbeit trennen Sie das Gerät vom Akku und füllen Sie etwas Wasser in die Verdampfungskammer bis dieses vorne austritt um das Gerät von Oxalsäurerückständen zu reinigen.**
- 3. Nach dem Entleeren empfiehlt es sich das Gerät zu erhitzen um eventuelle Wasserrückstände zu entfernen.**
- 4. Geben Sie einen Tropfen Fett/Öl auf den O-Ring um die Lebensdauer zu erhöhen.**

Es wird empfohlen, von Zeit zu Zeit eine kleine Menge Wasser ca. 20ml durch den Spenderschlauch in das abgekühlte Gerät zu geben, dann den Spender wieder einsetzen und das Gerät erhitzen, sodass das Wasser im Inneren zum Kochen kommt.

---

## Garantie

**Wir geben Ihnen 2 Jahre Garantie auf den Instant Vap 18V. Im Falle eines Problems kontaktieren Sie uns bitte.**

#### **Kontakt:**

Wachs Hödl GmbH  
Deutsch Haseldorf 75  
8493 Klöch  
Österreich  
Tel: 0043 3475 2270  
E-Mail: info@wachs-hoedl.com